




Laad de Snore-Breaker volledig op.

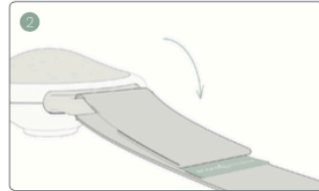


Bevestig de band aan de Snore-Breaker.

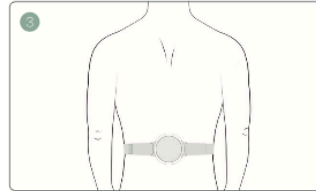


Positioneer de Snore-Breaker met de witte zijde tegen de rug.

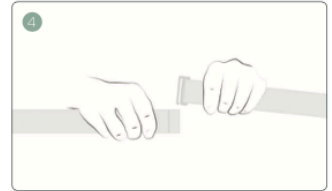


Sluit de band aan de voorzijde van het lichaam.

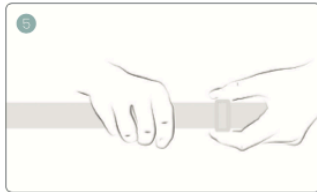

Verstel de band tot een gewenste lengte.

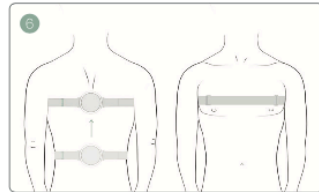

Verplaats de Snore-Breaker naar een positie tussen de schouderbladen.

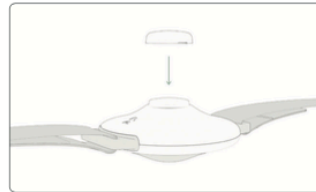

Bevestig de opzetdop indien een krachtigere doorgave van de vibraties is gewenst.

- Let op: Lees de volledige handleiding voor gebruik.
- Let op: de Snore-Breaker begint pas met het afgeven van vibraties als de knop 30 seconden wordt ingedrukt.
- Het product voldoet aan de Europese EMC en RoHS-richtlijn.
- Visit www.snore-breaker.com for the English manual.

INTRODUCTIE

Lees deze handleiding door voordat de Snore-Breaker in gebruik wordt genomen. Bewaar deze handleiding om indien nodig te kunnen raadplegen.

WERKING

De Snore-Breaker is speciaal ontwikkeld om ruggsnurken te voorkomen, doordat het de slaappositie verandert van rug- naar zijligging. Wanneer je tijdens de slaap op de rug draait, zal de Snore-Breaker geactiveerd worden door middel van een drukknop. De Snore-Breaker zal na 30 seconden lichte vibraties afgeven in verschillende ritmes, totdat je van de rug afdraait. Op deze manier wordt snurken in rugligging voorkomen. Eenmaal van positie veranderd, wordt de Snore-Breaker gedeactiveerd. De Snore-Breaker speelt in op het normale slaapritme. Het kan zijn dat je de eerste nachten moet wennen aan het slapen met de Snore-Breaker.

GEBRUIK

- Laad de Snore-Breaker volledig op, gebruik hiervoor de bijgeleverde adapter met adapterkabel. Zie hiervoor 'Opladen' verderop in deze handleiding.
- Bevestig beide banddelen aan de Snore-Breaker. Haal hierbij ieder banddeel door een siliconen lus van de Snore-Breaker (van de witte zijde naar de grijze zijde toe) en sluit de drukknop.

- Positioneer de Snore-Breaker met de witte zijde tegen de rug, zodat de grijze zijde van het lichaam af wijst.
- Haal beide banddelen langs de zij naar voren en sluit deze aan de voorzijde van het lichaam met de schuifclip.
- Verstel de band met de verstelclip tot een gewenste lengte. Let op dat de band voldoende is aangespannen om de Snore-Breaker op zijn plaats te houden bij gebruik tijdens de nacht.
- Verplaats de Snore-Breaker naar een positie tussen de schouderbladen. De band is hierbij gepositioneerd om de borst, net onder de oksels.
- Geniet van snurkvrije nachten!

OPLADEN

De Snore-Breaker bevat een oplaadbare batterij. Een volledig opgeladen Snore-Breaker heeft een batterijduur van circa 10 dagen. Het indicatielicht zal rood gaan knipperen bij een resterende batterijduur van 20%. Let op: per gebruiker varieert de batterijduur door gebruik en andere factoren. Om de Snore-Breaker op te laden, plug de USB-A aansluiting (grote uiteinde) van de adapterkabel in de USB-poort van de adapter. Plug vervolgens de USB-C aansluiting (kleine uiteinde) van de adapterkabel in de USB-poort van de Snore-Breaker. Plug de adapter in een geaarde voedingsbron en zorg dat de

Snore-Breaker tijdens het opladen op een veilige plek en een stabiele ondergrond ligt. Het volledig opladen van de Snore-Breaker duurt circa 3 uur.

Betekenis van het indicatielicht:

- Groen knipperend: aan het opladen
- Geen licht tijdens het opladen: volledig opgeladen
- Rood knipperend: bijna leeg

DRAAGPOSITIE

Voor de meest optimale werking dient de Snore-Breaker direct tegen de huid gedragen te worden, gepositioneerd tussen de schouderbladen.

OPZETDOP

De opzetdop kan bevestigd worden op de witte zijde van de Snore-Breaker indien een krachtigere doorgave van de vibraties is gewenst. In de opzetdop zit een kleine opening om deze weer te verwijderen.

REINIGING

Ontkoppel beide banddelen van de Snore-Breaker. Reinig de band middels handwas, gebruik hiervoor alleen water. Laat de band enkel aan de lucht drogen en strijk de band niet. Reinig de buitenkant van de Snore-Breaker met een droge doek. Gebruik nooit water, schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of desinfectiemiddelen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Snore-Breaker	
Afmetingen	93 x 80 x 35 mm
Gewicht	ca. 55 gram
Materiaal	ABS + PC, SI
Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
Trillingsnelheid	7.800-15.600 rpm
Batterijtype	Oplaatbare Lithium polymeer
Batterijcapaciteit	70 mAh
Gebruikstijd	ca. 10 dagen
Complete oplaadduur	ca. 3 uur
Adapter en adapterkabel	
Input voltage	100-240V~ 50-60Hz 0.3A
Output adapter	5V \leftrightarrow 1A
Type adapter	Euro stekker, USB-A
Lengte adapterkabel	100 cm
USB poort product	USB-C
Veiligheidsstandaard	CE Certificatie
EMC	IEC 60601-2 gekeurd
Band	
Verstelbaar (excl. rek)	70 - 106 cm
Type bandsluiting	Schuifclip
Materiaal band	70% nylon, 30% elastaan

Dit product mag niet als huishoudelijk afval behandeld worden. Geef het daarom af bij het toepasselijk inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Dit helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen die niet in acht worden genomen, kunnen leiden tot letsel aan de gebruiker of schade aan het product en accessoires.

- Openen van of wijzigingen aan het product of accessoires die niet door Snore-Breaker B.V. zijn geautoriseerd, kunnen de werking veranderen. Na ongeautoriseerde wijzigingen vervalt de garantie en staat Snore-Breaker B.V. niet in voor de werking van het product en eventuele schade of letsel door het product.
- Snore-Breaker B.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel door onjuist gebruik of door het niet in acht nemen van de waarschuwingen. Ieder gebruik van de Snore-Breaker en accessoires anders dan in de handleiding vermeld, wordt beschouwd als onjuist gebruik.
- Alle risico's behorend bij het gebruik van de Snore-Breaker worden uitsluitend door de gebruiker gedragen.
- De Snore-Breaker en accessoires altijd buiten het bereik van kinderen houden.
- In verband met inslikings- en verstikkingsgevaar dienen de Snore-Breaker en accessoires altijd op een veilige plek bewaard te worden, buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen de door Snore-Breaker B.V. bijgeleverde accessoires.
- De Snore-Breaker en de band dienen uitsluitend gepositioneerd en bevestigd te worden zoals in deze handleiding vermeld

staat. Positioneer en bevestig de Snore-Breaker en de band niet op of rond andere lichaamsdelen.

- In verband met het risico op afknellen, dient de band niet te strak ingesteld en bevestigd te worden.
- Voor het gebruik, dragen of reinigen van de Snore-Breaker dient de Snore-Breaker ontkoppeld te worden van de voedingsbron.
- De Snore-Breaker en accessoires uitsluitend uitwendig gebruiken.
- Vermijd vallen, slaan, stoten, schokken, grote krachten, uittrekken, misbruiken en inslikken van de Snore-Breaker en accessoires en gebruik geen scherpe objecten of andere middelen die schade kunnen veroorzaken aan het product of aan de gebruiker.
- Om schade aan en rondslingeren of kwijtraken van de Snore-Breaker en accessoires te voorkomen, dienen de Snore-Breaker en accessoires altijd in de originele verpakking, op een veilige plek en in een droge omgeving bewaard te worden.
- Stel de Snore-Breaker, adapter en adapterkabel niet bloot aan vocht, vuil, stof, vloeistoffen en chemische stoffen. Stel de band niet bloot aan chemische (vloeistoffen).
- Stel de Snore-Breaker en accessoires niet bloot aan vuur. Stel de Snore-Breaker en accessoires niet bloot aan en gebruik of bewaar deze niet bij temperaturen onder de 0 of boven de 50 graden Celsius.

- Vermijd in alle gevallen dat de USB-poort, adapterkabel en adapter vochtig worden.
- Gebruik de Snore-Breaker en accessoires niet of laad de Snore-Breaker niet op indien beschadigingen zichtbaar zijn of worden vermoed aan de Snore-Breaker of accessoires.
- Gebruik alleen geaarde voedingsbronnen voor het opladen van de Snore-Breaker.
- Draag de Snore-Breaker en de band niet op de beschadigde huid.
- Raadpleeg altijd de behandelend arts voordat de Snore-Breaker wordt gebruikt in combinatie met een pacemaker of ander medisch implantaat. De elektromagnetische emissie van de Snore-Breaker kan mogelijk interfereren met het medisch implantaat.
- Gebruikers met een speciale lichamelijke of geestelijke staat adviseren wij contact op te nemen met hun behandelend arts alvorens de Snore-Breaker te gebruiken.
- Stop bij een allergische reactie door materialen van de Snore-Breaker of accessoires onmiddellijk het gebruik en raadpleeg een specialist.
- Bij vragen of onduidelijkheden over deze instructies kan contact worden opgenomen met Snore-Breaker B.V.

LET OP

- In deze handleiding wordt met accessoires altijd de door Snore-Breaker B.V. bijgeleverde accessoires bedoeld (adapter, adapterkabel, band, opzetdop).

- De Snore-Breaker is uitsluitend bedoeld om ruggsnurken te voorkomen. Heftig snurken kan een teken zijn van obstructief slaapapneu of een andere ademhalingsstoornis. Raadpleeg een specialist bij een vermoeden van obstructief slaapapneu of andere ademhalingsstoornissen.
- Vermijd excessief uittrekken van de band en siliconen bandhouders.
- Uittrekken en plots loslaten van de band kan schade aan de gebruiker of omstanders toebrengen.
- Om schade aan de Snore-Breaker te voorkomen en schade aan de gebruiker door scherpe onderdelen te voorkomen, mag de Snore-Breaker nooit geopend worden.
- Bij schade aan de Snore-Breaker en accessoires dient contact met eventuele scherpe onderdelen te worden vermeden.
- Ontkoppel de Snore-Breaker van de voedingsbron, indien de Snore-Breaker onbeheerd blijft.
- Draag de Snore-Breaker bij overmatig transpireren over de kleding. Mogelijk worden vibraties hierdoor verminderd doorgegeven.

ONDERSTEUNING

Kijk voor meer informatie op www.snore-breaker.com of stuur een email naar info@snore-breaker.com. Wij helpen je graag verder.